

THERMO CLEAR

Spezialklarspüler
für thermische
Steckbeckenautomaten



PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm

THERMO CLEAR ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es gewährleistet eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist sehr schaumarm eingestellt.

THERMO CLEAR ist biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

THERMO CLEAR ist geeignet für thermisch spülende Steckbeckenspülen gängiger Hersteller. Nicht anwenden in nicht-thermischen und nicht-säurebeständigen Steckbeckenspülen.

Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMO CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in

dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-säurebeständige Steckbeckenspülen geeignet.

Dosierung

0,1 - 0,3% (bzw. 1 - 3 ml/l), je nach Automatentyp und Wasserhärte (siehe Herstellerangaben).

Zudosierung erst ab 30 °C. Dosierung durch Fachpersonal durchführen.

Zusammensetzung

Organische Säuren < 30 %, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von THERMO CLEAR ist für alle getesteten Materialien gegeben.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
THERMO CLEAR	Kanister	3	5 L	00-127-050AT
	Flachkanister	3	5 L	00-127-050
Dosierhilfen	Kanisterdosierpumpe	1	2L/5 L/10 L	00-906-000-01
	Kanisterumfüllhahn	1	2L/5 L/10 L	00-907-000
Zubehör	Kanisterschlüssel	1		00-909-050

