

VAH

ÖGHMP

IHO

CE 0482

Hettich
Herstellereigabe

Schnelldesinfektionsmittel

DESCOSEPT pur

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- rückstandsfrei, keine Ablagerung nach Anwendung
- schnell wirksam
- parfümfrei



Produktbeschreibung

DESCOSEPT pur ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. DESCOSEPT pur ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet.

Anwendungsgebiete

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):
Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Wirkpektrum

- bakterizid (inklusive MRSA)
- tuberkulozid
- mykobakterizid
- levurozid (*C. albicans*)
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/ Grippe-/ Adeno-/Noroviren)

Wirksamkeiten und Prüfmethode			30 Sek.	1 Min.	2 Min.	3 Min.	5 Min.
Bakterien und Pilze							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH**	mit Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•			
		ohne Mechanik, hohe Belastung			•		
		ohne Mechanik, niedrige Belastung		•			
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid)*	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung					•
Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich (bakterizid, levurozid)*	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•			
tuberkulozid (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	niedrige Belastung	•				
mykobakterizid (<i>M. avium</i>)	EN 14348	niedrige Belastung		•			
Viren							
wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid)**	RKI/DW	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476		•				
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				•	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	niedrige Belastung		•			

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
**gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste



DESCOSEPT pur

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

ergänzende Prüfergebnisse nach EN			1 Min.
bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung	•
	EN 1276	hohe und niedrige Belastung	•
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung	•
	EN 1650	hohe und niedrige Belastung	•
bakterizid, levurozid	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung	•

Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. **DESCOSEPT pur** kann als Wischdesinfektion oder Spray verwendet werden.

Flächenwischdesinfektion (empfohlene Art der Anwendung):

DESCOSEPT pur auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein. Eine Sprühanwendung ist nur für schwer zugängliche Oberflächen zulässig.

Herstellerempfehlungen

Chemical Check GmbH, Steinheim:
Bewertung von **DESCOSEPT pur** zum Einsatz in der Lebensmittelhygiene im Rahmen des HACCP-Konzeptes.

Derma Consult GmbH, Alfter
Patch-Test am Menschen (Kosm. Studie).

Hettich Zentrifugen
Materialverträglichkeitstests an Zentrifugen.

Bergé & Co. GmbH, Versmold
Freigabe zum Einsatz von **DESCOSEPT pur** mit MM-Desinfektionsmatten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
45 g Ethanol
Parfümfrei, keine auf der Fläche verbleibenden Inhaltsstoffe.

Chemisch-Physische Daten

Aussehen: klare, farblose Lösung
pH-Wert: ca. 6,5
Dichte: ca. 0,92

Gutachten

Dr. M. Suchomel, Hygienikerin, Wien
Gutachten zur Flächendesinfektion gemäß VAH-Richtlinien.

Prof. Dr. H.-P. Werner, Hygieniker, Schwerin
Gutachten zur:

- Flächendesinfektion gemäß VAH-Richtlinien
- Flächendesinfektion (4-Felder-Test) gemäß EN 16615
- bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit gemäß EN 1276, EN 13727, EN 13624 und EN 1650
- bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit gemäß EN 13697
- Wirksamkeit gegen Rotaviren gemäß EN 14476
- Wirksamkeit gegen Noroviren (MNV) gemäß EN 14476

- tuberkuloziden Wirksamkeit (M. terrae) gemäß EN 14348
- mykobakteriziden Wirksamkeit (M. avium) gemäß EN 14348

Dr. J. Steinmann, Virologe, Bremen

Gutachten zur Wirksamkeit gegen
- BVDV und Vacciniaviren gemäß RKI/DVV Leitlinie.
- Adenoviren gemäß EN 14476.

Prof. Dr. R. Schubert, Hygieniker, Frankfurt
Gutachten zur Flächendesinfektion gemäß VAH-Richtlinien.

Besondere Hinweise

Entzündlich. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Behälter dicht geschlossen halten! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ausbringung max. 50 ml/m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m² Raumgrundfläche betragen.

Listungen/Produktstatus

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der VAH und der ÖGHMP.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de) und der IHO-Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich (www.iho-des-infektionsmittelliste.de).

Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N - 38816 und N - 20109. Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Umweltinformation

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOSEPT pur	Flasche	1 L	10	00-323-010	01898718
	Kanister	5 L	3	00-323-050	01834380
Dosierhilfen	Sprühkopf	1000 ml	1	00-905-010	-
	Kanisterdosierpumpe	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-